



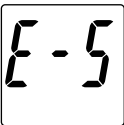

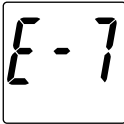




表示	原因	こうしてください
	グルテストNeoスーパーが故障しています。	販売元にお問い合わせください。
	測定温度の範囲外です。	温度10～40℃の場所にグルテストNeoスーパーとグルテストNeoセンサーを移し、20～30分以上なじませてから測定をやりなおしてください。それでも「E-2」が表示されるときは販売元にお問い合わせください。
	グルテストNeoスーパーが故障しています。	販売元にお問い合わせください。

表示	原因	こうしてください
 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. グルテスト Neo スーパー内が結露している可能性があります。</li> <li>2. グルテスト Neo スーパーが故障しています。</li> </ol>	<p>温度10～40℃、湿度20～80%の場所にグルテスト Neo スーパーとグルテスト Neo センサーを移し、20～30分以上放置してから測定をやりなおしてください。それでも「E-4」「E-5」が表示される場合は販売元にお問い合わせください。</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. グルテスト Neo センサーを裏向きに挿入しました。</li> <li>2. グルテスト Neo センサーの挿入部分（電極）に水やアルコールが付着するなど汚れている可能性があります。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. グルテスト Neo センサーの表裏を確認して、正しい向きで差し込んでください。</li> <li>2. 新しいグルテスト Neo センサーを使用して、測定をやりなおしてください。</li> </ol>

表示	原因	こうしてください
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 挿入されたセンサーが正しくありません。</li> <li>2. グルテスト Neo センサーの挿入部分（電極）に水やアルコールが付着するなど汚れている可能性があります。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正規のグルテスト Neo センサーを挿入してください。</li> <li>2. 新しいグルテスト Neo センサーで測定をやりなおしてください。 <b>重要</b> 仕様変更前のグルテスト Neo センサーを挿入した場合も「E-7」が表示されます。仕様変更後のグルテスト Neo センサーを使用してください。</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 血液またはコントロール液を一度吸引させたグルテスト Neo センサーが挿入されました。</li> <li>2. 血液マークと前回測定結果が交互に表示される前に、血液を吸引させました。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新しいグルテスト Neo センサーで測定をやりなおしてください。</li> <li>2. 新しいグルテスト Neo センサーで測定をやりなおしてください。</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. グルテスト Neo センサーに吸引させる血液の量が不足しました。</li> <li>2. グルテスト Neo センサーの先端に血液が接触しませんでした。</li> </ol>	新しいグルテスト Neo センサーを使用して、十分な量の血液を吸引させてください（33～34ページ参照）。