


4 グルテストNeoセンサーを差し込む

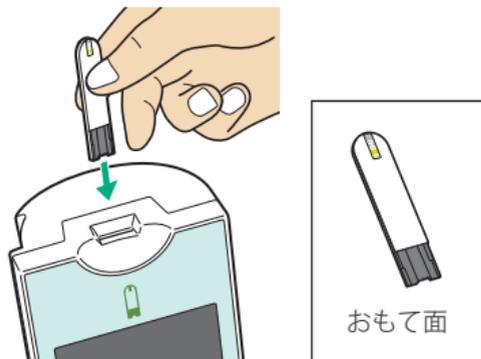

- ① グルテストNeoセンサーのおもて面を手前にして持ちます。
- ② センサー挿入口の奥までしっかりと差し込みます。



イラストは
月ごとに
変わります。

・「ピッ」と鳴って電源が入り、各月の季節画面が表示されます。

重要 この画面が表示されているあいだは、グルテストNeoセンサーを血液に接触させないでください。エラーが表示されて測定できません。

はじめに

使用上の注意

準備

測定

便利な機能

メンテナンス

困ったときは