
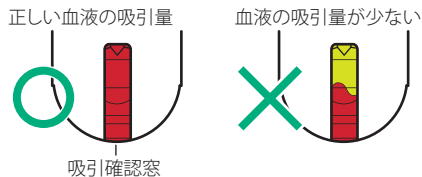


8 血液に接触させる

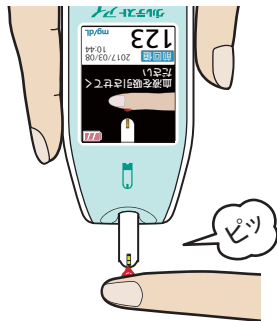

①手順**5**の画面が表示されていることを確認します。

参考 電源が切れている場合は、グルテストNeoセンサーを抜き取り、もう一度、差し込んでください。





②グルテストNeoセンサーの先端を下に向けて、グルテストアイを持ちます。

③グルテストNeoセンサーの先端に血液を接触させます。

④吸引確認窓の全面が赤くなるまで十分に血液を吸引させます。

⑤「ピッ」と鳴ったら、指をはなします。

・測定が開始されます。

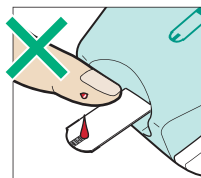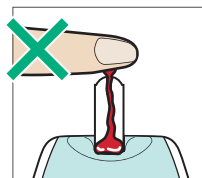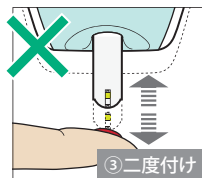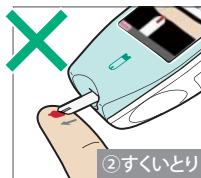

重要 血液の吸引が適切でないと正しい測定結果が得られないことがあります。

- ①グルテストNeoセンサーを皮膚に押しつけないでください。
- ②グルテストNeoセンサーで血液をすくい取らないでください。
- ③一度血液からはなしたグルテストNeoセンサーに、血液を二度付けしないでください。
- ④グルテストNeoセンサーを皮膚にひっかけて、血液を飛び散らさないでください。

重要 グルテストNeoセンサーの先端を上向きにした状態で血液に接触させないでください。センサー挿入口から内部に血液が入り、故障の原因になります。

重要 グルテストNeoセンサーの吸引確認窓の上から血液を接触させても測定できません。必ず先端を血液に接触させてください。