

電池を交換する

重要 「電池残量が少なくなりました」または「電池残量がなくなりました」と表示されたら新しい電池に交換してください。そのまま測定をはじめると途中で電源が切れ、測定結果が得られないことがあります。



電源を入れた後、
2秒間表示されます。



電池切れです。

参考 電池を交換しても記憶データは消去されません。

参考 電池の交換は5分以内に完了してください。5分を超えると内蔵時計がリセットされます。なお、以下の場合は5分以内でもリセットされることがあります。


- ・電池切れの画面が表示された後、すぐに電池を交換しなかった場合
 - ・電池を逆向きに入れ、そのまま5分以上放置した場合
- リセットされると、内蔵時計は最終測定日の翌日の0時0分で停止します。電池を交換すると0時0分から動作を開始します。

参考 内蔵時計がリセットされた場合は、正しい日付・時刻にあわせてください（51ページ参照）。

準備するもの：アルカリ乾電池 単4形（2個）

※コンビニエンスストアまたは電気店で求めください。

※電池は2個同時に新しいものに交換してください。

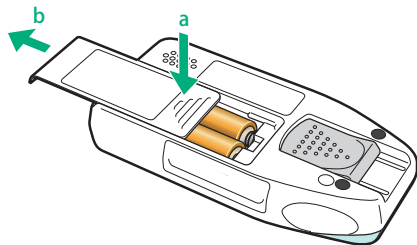

①裏面の電池カバーを開けます。


- ・▽マークを押したまま (a)、スライドさせると開きます (b)。

警告

取りはずした電池カバーは、乳幼児が誤って飲み込んだりしないよう取り扱いに注意してください。

注意

内部の金属部分には手や金属で触れないでください。

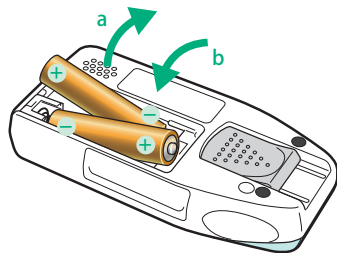


②古い電池を取り出し (a)、新しい電池を入れます (b)。

- ・電池を取り出すときは、電池を一側（バネがある方向）に軽く押しながら取り出してください。

注意

電池は+側と一側が左図の向きになるように入れてください。

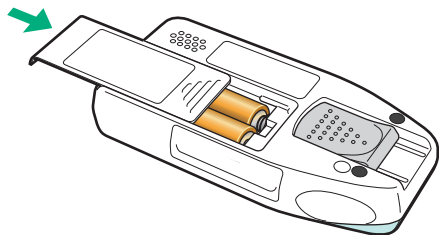

③電池カバーを閉めます。

- 電池カバーをスライドさせ、カチッと音がすれば、正しく閉まっています。

警告

電池は乳幼児の手の届かないところに保管または廃棄してください。万一飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。

警告

使用済みの電池を加熱したり、火に投げ入れたりしないでください。破裂してけがを負うおそれがあります。

重要 使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。