

# エースレットII 操作方法

(SKKブラッドランセット 30G・33G)

詳細はエースレットII取扱説明書をお読みください。


**注意** 採血用穿刺器具は患者個人の使用に限り、複数の患者に使用しないでください。付着した患者の血液などを介した感染の危険性があります。

## 1 採血キャップを取り外します。



採血キャップを回して取り外します。採血キャップを回すときは、透明部を持って回してください。

## 2 採血針を装着し、採血針の保護キャップを外します。

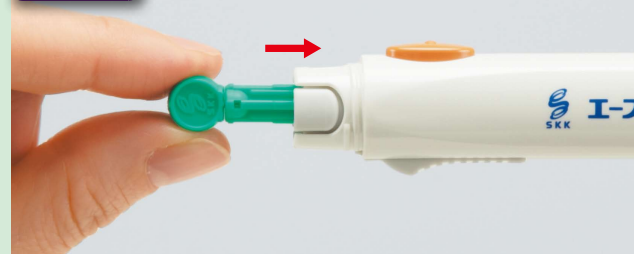

新しい採血針をエースレットIIのランセットホルダーの底部までしっかりと装着します。  
①採血針の保護キャップをねじって②外します。

## 3 採血キャップを取り付けます。



採血キャップを回して取り付けます。採血キャップを回すときは、透明部を持って回してください。

**注意** 採血針を本品に装着したまま放置しないでください。採血針が誤って射出される危険性があります。

## 4 「深さ調節ダイヤル」を回して穿刺深さを設定します。



深さ調節ダイヤルを回して穿刺深さを設定します。痛みを最小限にするために、初めてのご使用のときには1から始めて測定に必要な採血量を得る最低の数字に設定してください。

※採血前に誤って穿刺ボタンを押してしまった場合は、つまみをカチッと音がするまで引っ張ってください。

穿刺深さの目安	表示設定
より浅く穿刺します	1-2
標準的な深さ	3-5
より深く穿刺します	6-7

## 5 消毒し乾燥させた後、指先にあてて穿刺ボタンを押し、血液滴を得ます。



穿刺前に、必ず流水でよく手を洗い、消毒綿で採血部分を消毒し乾燥させます。オレンジ色の穿刺ボタンを押して必要な血液滴を得ます。

**注意** 穿刺ボタンを押す前に、ご自身の深さ設定かどうか再確認してください。

## 6 使用済採血針を保護キャップに刺して安全に廃棄します。



①②使用済みの採血針を、保護キャップに刺します。  
③廃棄レバーを押して、使用済みの採血針を針回収容器に廃棄します。

**注意** 採血針の繰り返しでの使用は、感染のおそれがありますので絶対にしないでください。

# エースレットIIと採血針の各部の名称

## エースレットII



採血用穿刺器具  
一般医療機器

### エースレットII

包装・統一商品コード 1本/086506021  
届出番号/33B2X00002000004  
製造販売元/株式会社旭ボリスライダー

## 採血針



SKKブラッドランセット30Gの例

単回使用自動ランセット  
管理医療機器

### •SKKブラッドランセット30G

包装・統一商品コード  
25本入 086620840  
30本入 086620864  
200本入(25本×8箱) 086620857  
240本入(30本×8箱) 086620871

### •SKKブラッドランセット33G

包装・統一商品コード  
25本入 086620956  
30本入 086620963

認証番号/219AFBZX00092000  
製造販売元/株式会社旭ボリスライダー

ご使用の前には、添付文書、取扱説明書を必ずお読みください。

●製品の取扱いに関するお問い合わせは、三和化学研究所へ  
フリーダイヤル ハイサンワ  
**0120-07-8130**  
お問い合わせは365日24時間受け付けいたします。



販売元  
株式会社 三和化学研究所

名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631  
●ホームページ <http://www.skk-net.com/>  
●グルテスト情報サイト <http://www.glutest.com/>